



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Слуховой аппарат АХОН С-109



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Использование аппарата.....	3
3. Правильная зарядка слухового аппарата	4
4. Технические характеристики	4
5. Важно помнить	4

1. Описание устройства

Благодарим вас за покупку нашего слухового аппарата.


Если вам трудно хорошо слышать окружающих, слуховой аппарат поможет вам восстановить слух, чтобы вы могли жить привычной жизнью.

Ношение слухового аппарата поможет Вам заново открыть для себя удовольствие от общения с друзьями и семьей, чувствовать себя более уверенно на работе и наслаждаться фильмами, музыкой и ТВ-шоу.



- Переключение на режим Off выключает аппарат;
- Переключение на H – включает режим шумоподавления;
- Переключение на N – включает нормальный режим;
- Громкость регулируется от 1 до 4.

2. Использование аппарата

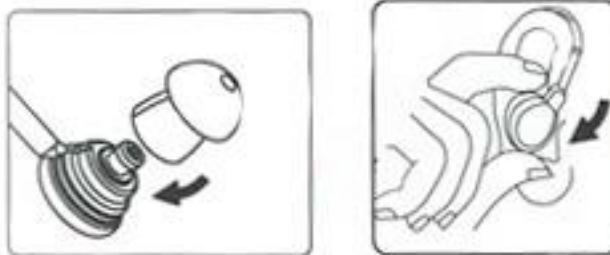

- 1) Наденьте вкладыш на наушник.
- 2) Поставьте переключатель режимов в положение Выкл (Off), в противном случае резкий громкий звук может доставить вам дискомфорт.
- 3) Наденьте слуховой аппарат за ухо, плотно вставьте вкладыш в ухо. Вкладыш подбирайте чуть большего размера, чем ваше ухо. Он должен плотно прилегать к уху – это поможет избежать появления шумов.

- 4) Поставьте переключатель режимов в положение Вкл (N) и постепенно настройте громкость, чтобы ясно слышать окружающие звуки.
- 5) В шумном месте вы можете переключить режим на (H), чтобы включить программу шумоподавление.

3. Правильная зарядка слухового аппарата

Если звук в слуховом аппарате очень слабый или слуховой аппарат не работает, возможно, в слуховом аппарате низкий заряд батареи. Когда батарея в слуховом аппарате почти разряжена, он начинает издавать звуковой сигнал. Пожалуйста своевременно заряжайте его.

- 1) Выключите аппарат на время зарядки, подключите к нему зарядное устройство (5 В, 50 мА- 500 мА);
- 2) Подключите зарядное устройство к сети;
- 3) Новый слуховой аппарат следует заряжать 4 часа. Желательно ставить на зарядку после того, как аккумулятор полностью разрядился.

4. Технические характеристики

Зарядное устройство	5 В, 50 мА – 500 мА
Батарея	55 мАч
Размеры	50x48x8,6 мм
Вес	9 г
Вывод звука	130±5 дБ
Усиление звука	36±5 дБ
Искажение звуковой волны	≤5%
Диапазон частот	300 Гц – 4000 Гц
Входящий шум	≤ 30 дБ
Напряжение	3.7 В
Сила тока	≤2 мА

5. Важно помнить

- 1) Если вы слышите свист во время использования слухового аппарата, убедитесь, что вкладыш плотно зафиксирован в ухе или подберите подходящий по размеру вкладыш из комплектации.
- 2) Пожалуйста, не используйте слуховой аппарат на большой громкости в течение длительного времени, это может повредить ваш слух.

- 3) Следите за состоянием изделия постоянно, чтобы избежать блокировки наушника или микрофона посторонними предметами. Поддерживайте вкладыш в ухо в чистоте.
- 4) Не подвергайте слуховой аппарат и его батарею воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры и воды. Не используйте в душе, под дождём, во время купания.
- 5) Не роняйте аппарат на пол.
- 6) Держите вдали от детей.
- 7) Если в течение долгого времени не планируете пользоваться слуховым аппаратом, вытащите батарею из устройства.
- 8) Не разбирайте самостоятельно слуховой аппарат. В случае возникновения неполадок, обратитесь в сервисный центр. Не утилизируйте батарею слухового аппарата с бытовыми отходами.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**